

Bruksanvisning

City



Van Raam | Guldenweg 23 | 7051 HT Varsseveld | Nederlanderna



Version 20.08

Innehållsförteckning

Kontaktuppgifter tillverkare	1
Konformitet	2
Inledning	2
Leverans	2
Användning	3
Säkerhetsföreskrifter	3
Inställningar	4
Tekniska specifikationer	6
Underhåll och inställningar hemma	6
Underhåll hos återförsäljare/verkstad	7
Återvinning	7
Överlåtelse/försäljning till nya ägare	7
Garanti	7
Ramnummer	8
Servicelogg och modifikationer	9
Blankett för leveranskontroll	11

Kontaktuppgifter tillverkare

Van Raam
Guldenweg 23
7051 HT Varsseveld
Nederländerna

Tel. : +31 (0)315 257370
E-mail : info@vanraam.com
Internet : www.vanraam.com

Konformiteit

Van Raam förklarar som tillverkare att Chat-cykeln, som beskriven i denna bruksanvisning uppfyller kraven enligt standarden 2006/42/EG.

Konformitetsförklaringen hittar man även på Van Raams hemsida.

Inledning

Denna bruksanvisning ger viktig information kring montaget och användning av Er van Raams cykel CHAT. Vi ber Er att läsa denna bruksanvisningen noga innan Ni tar cykeln i bruk. Följ alltid instruktionerna såsom beskrivna i denna bruksanvisning.



LÄS NOGA

Leverans

Er leverans ska innehålla följande delar:

- Emballerat cykel
- Bruksanvisning(ar)

Kontrollera Er leverans direkt efter mottagande. I fall av skador eller en ofullständig leverans ber vi Er att omgående ta kontakt med Er återförsäljare.

Fyll vid leverans tillsammans med Er återförsäljare i blanketten "leveranskontroll" som finns på längst bak i denna bruksanvisning.

Användning

City gånghjälp är avsedd för användare som har svårt för att gå eller stå längre tid eller sträckor. City är lämpad för normal användning på jämn och stabil underlag.

Säkerhetsföreskrifter

Kontrollera innan varje användning:

- bromsverkan;
- däcktrycket;
- att inga delar sitter lösa.

Belastning

Den maximalt tillåtna belastningen får inte överskridas. Se tabellen med tekniska specifikationerna på sida 6.

Skadade eller slitna delar

Byte och reparation av delar (ram, framgaffel, belysning, bromsar, andrivning och styret) skall **alltid** göras av återförsäljaren eller en av återförsäljaren godkänd verkstad. Om inte ovan regel följs, förfaller garantin och blir cykelns ägare själv ansvarig för skada.



Säkerhetsrelaterade delar ska **alltid** bytas så fort de tappat sin funktion.

Innan man börjar använda sin City ska man ställa in, ställ in den på användarens längd och förutsättningar. Det är viktigt att inställningarna är rätt, framförallt för vad gäller sadel och styret.

Bromsarna är inställda på fabriken och får endast hanteras av återförsäljare/verkstad i samband med underhåll eller reparation.




Se till att inte klämma fingrarna när man ställer in gånghjälpen.

Sadelhöjd

Man ställer in sadelhöjden rätt genom att sätta sig på sadeln och sträcka ut båda benen ner till marken. Benen ska vara sträckta, men utan att behöva översträcka sig.

För att ställa in sadeln::

1. Vrid loss snabbkopplingen några varv.
2. Flytta sadeln till rätt höjd.
3. Stäng snabbkopplingen igen..

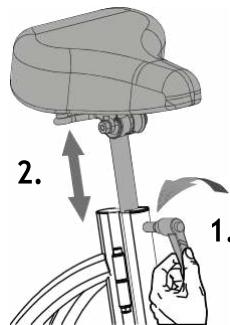


Styrhöjd

Styrets höjd har stor inverkan på körkomforten. Denna avgör trycket på handledarna och ryggens position. Vad som är den mest komfortabla positionen avgör man själv i praktiken.

För att ställa in styret:

1. Dra loss bulten några varv med en sexkantsnyckel.
2. Skjut styret till rätt höjd och dra sedan åt bulten igen.

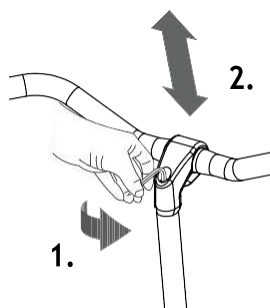

Styret får INTE dras ut längre från styrröret än till markeringen. Annars går styret inte tillräckligt långt ner i styrröret och riskerar styret att lossna under färd.




Styrets vinkel

Man kan vinkla styret, vilket påverkar avståndet från styr till överkroppen. Man får avgöra själv vad som känns mest bekväm i praktiken.



För att vinkla styret:

1. Dra loss bulten några varv med en insexnyckel.
2. Ställ styret in önskat position och dra sedan åt bulten igen.

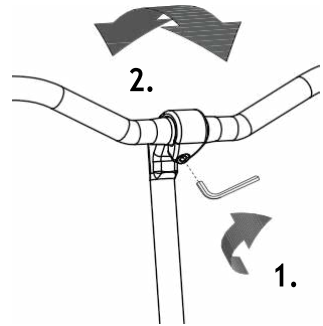

Vika ihop/upp er City gånghjälp

1. Låsa upp låset med nyckeln.
2. Öppna klämman och vika gånghjälpen.

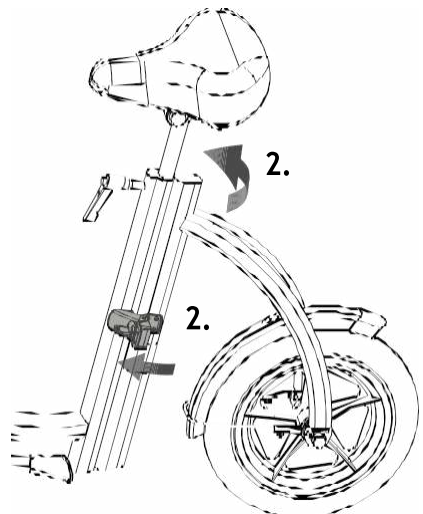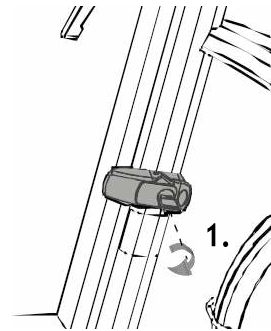

Tekniska specifikationer

Längd (cm)	113
Bredd (cm)	55
Höjd (cm)	70 – 95 (ställbar)
Framhjul	12,5"
Bakhjul	12,5"
Vikt (kg)	cirka 9
Max. vikt användare (kg)	100 ¹ , 150
Broms, framsida	Velgrem

¹ standard

Underhåll och inställningar hemma

Här nedan följer instruktioner för underhållet och inställningar som ägaren/ användaren själv regelbundet kan utföra, för att hålla cykeln i bra skick.

Rengöring

Ramen kan rengöras enklast med en fuktig trasa. För extra smutsiga ställen kan man använda ett mildt rengöringsmedel.

Hjulen kan rengöras med en fuktig borste. OBS! Det ska vara en relativt mjuk borste. Man får absolut inte använda stålborste. Handtagen, sadeln och sittdelen kan rengöras med vatten och ett mildt rengöringsmedel



Använd ingen högtrycks- eller ångtvätt!

Inspektion

Det är viktigt att gånghjälpen inspekteras minst en gång per år av återförsäljaren eller godkänd verkstad för att fortsatt kunna göra anspråk på produktens garanti. Använd blanketten "servicelogg & modifikationer" längre bak i den här bruksanvisningen. Den första kontrollen/servicen ska göras efter 200 kilometer eller två månader.

Utbyte av delar som är viktiga för cykelns och användarens säkerhet ska endast utföras av återförsäljare eller godkänd verkstad. Detta gäller till exempel ram; bromsar, belysning, styre, framgaffel och andrivning.

Om man byter ut komponenter själv då förfaller garantin och är man själv ansvarig för skador.

Reparationer, underhåll och modifikationer får endast utföras med Van Raams egna reserdelar.

Underhållsschema (att utföras av återförsäljare/godkänd verkstad)

Intervall	Kontrolleras:
Efter 200 km eller 2 månader	Bromsen
Årligen	Samtliga delar och funktioner
Efter ett fall eller en olycka	Samtliga delar och funktioner

Återvinning

När cykeln har nått slutet på sin livslängd kan den lämnas till återvinningscentralen. Man kan eventuellt ta kontakt med sin kommun för hjälp med bortforsling.

Överlåtelse/försäljning

Om ni ska lämna över eller sälja Er cykel till en ny ägare är det viktigt att all teknisk dokumentation och extra-nycklar lämnas över till den nya ägaren, så att även den nya ägaren ska kunna använda cykeln på ett säkert sätt.

Garanti

Garantin gäller för alla fel och defekter på cykeln och dess delar, om det kan härledas till material eller fabrikationsfel.

Van Raam lämnar 5 års garanti på ramen, framgaffel och lackering. På alla övriga delar och komponenter lämnas 2 års garanti. Slitagedelar är undantagna. Garantiegäller vid normal användning och om service och underhåll är utförd såsom föreskriven.

OBS!

Såväl garanti som producentens produktansvar förfaller om instruktioner i denna bruksanvisning inte har följts, om det har utförts underhåll eller reparationer av icke-godkända verkstäder och om det har gjorts tekniska ändringar eller modifikationer med icke godkända (reserv)delar och utan godkännande från Van Raam.

Även cykelns CE-certifiering förfaller i ovannämnda fall. Icke giltig CE-certifiering kan leda till problem i försäkringsfrågor.

Ramnummer

Ramnummret hittar ni på märkningen som har applicerats på ramen. Se bild.

Exempel:



Position märkning:

På baksidan på ramen



För att garantin ska gälla ska Er Van Raam cykel servas enligt följande schema:.

Service:	Utförd: (datum)	Sign verkstad:
Service efter första 200 km eller 2 månader		
Service, 1 år efter leverans		
Service, 2 år efter leverans		
Service, 3 år efter leverans		
Service, 4 år efter leverans		
Service, 5 år efter leverans		

Vi rekommenderar att även efter år 5 att fortsätta med regelbunda servicetillfällen. Att fortsätta serva gånghjälpen efter 5 år påverkar inte garantin, men på gånghjälpens livslängd och användarnas säkerhet har det en positiv effekt.

Utförda modifikationer

Följande modifikationer har utförts:

Modifikation:

Utförd: (datum)

Utförd av:

OBS! Om det har gjorts modifikationer av en icke av Van Raam godkänd verkstad eller icke av Van Raam godkända delar har används, då förfaller garantin.

[illegible]

Grattis med Ert köp av en Van Raam gånghjälp. Denna cykeln är producerad med yttersta nogrannhet. För att säkerställa att ni får en cykel i rätt kvalitet producerar Van Raam cyklarna i enlighet med ISO 9001:2008 kvalitetskrav. Van Raam har i det syftet blivit certifierat utav TÜV Rheinland Nederland B.V.

Man kan njuta optimalt av den här speciellt för Er tillverkade Van Raam cykel om cykeln ställs in för just Er och om anvisningarna i bruksanvisningen följs noga. Kom också ihåg de föreskrivna servicetillfällen, de borgar för långvarig cykelglädje.

För att kunna falla tillbaka på produktensgaranti är det viktigt att alltid fylla i service rapporten och blanketten för leverans. På denna blankett signerar återförsäljaren och ägaren/användaren även för att ägaren/användaren har tagit del av en instruktion angående cykelns möjligheter och funktioner, samt att ägaren/användaren har tagit emot Van Raams officiella bruksanvisning.

Att fylla i vid leverans

Cykelmodell:	
Ramnummer:	
Nyckelnummer:	
Levererat till:	
Återförsäljare:	
Ort:	
Datum:	
Signatur, cykelns användare:	Signatur, återförsäljare:
Återförsäljarens kontaktuppgifter:	